


Istruzioni per l'uso

Estensione leva freno

Goditi la mobilità.

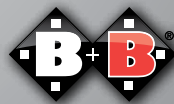

1. Osservazione preliminare

Caro utente,

Un'estensione della leva del freno è disponibile opzionalmente come accessorio originale per la maggior parte delle sedie a rotelle manuali di B + B. La leva del freno estesa riduce la forza di azionamento in frenata ed è quindi particolarmente adatta a persone con forza della mano ridotta. Queste istruzioni per l'uso servono come supplemento alle istruzioni per l'uso del prodotto principale e non le sostituiscono.

Osservare queste istruzioni per l'uso quando si utilizza il freno B + B con estensione della leva del freno.

L'estensione della leva del freno viene installata dal rivenditore specializzato. Le istruzioni di installazione saranno messe a disposizione del rivenditore specializzato

In caso di domande, il servizio clienti B+B è disponibile al numero di telefono + 49 (0) 700/6000 7070 disponibile.



Importante! Denota informazioni particolarmente utili nel rispettivo contesto tematico.



Attenzione! Indica informazioni particolarmente rilevanti per la sicurezza. Osservare le istruzioni per l'uso!

Avviso!

Errori di stampa, variazioni di prodotto e colore e informazioni tecniche sono riservati. I colori dei prodotti mostrati possono variare leggermente nella realtà. Le immagini possono contenere accessori. La versione attuale delle istruzioni per l'uso è disponibile nell'area download del nostro sito Web: www.bischoff-bischoff.com.

2. Azionamento del freno di stazionamento con estensione della leva del freno

Se la sedia a rotelle è dotata di un'estensione della leva del freno, fare riferimento a queste istruzioni per l'uso.

2.1. Freni

- Prima di iniziare la marcia accertarsi che le leve del freno siano in posizione di lavoro (Fig. 1). Le maniglie di plastica devono essere inserite saldamente nelle leve (Fig. 1 e 2).
- Fermare la carrozzina (consultare le istruzioni per l'uso del prodotto principale).
- Spingere in avanti entrambe le leve del freno, destra e sinistra (Fig. 2).
- La sedia a rotelle è ora frenata in sicurezza.
- Per rilasciare il freno, tirare indietro le leve (Fig. 1).

2.2 Ripiegare l'estensione della leva del freno

- La leva del freno può essere ripiegata durante la guida o quando si cambia di lato.
- Estrarre la maniglia di plastica dalla leva (Fig. 3).
- Ripiegare la maniglia di plastica (Fig. 4).
- Prima di iniziare la marcia, il freno deve essere riportato in posizione di lavoro in ordine inverso (Fig. 1).




Il freno di stazionamento agisce solo su una ruota motrice e quindi deve essere sempre utilizzato su entrambi i lati!



Osservare le indicazioni sui controlli dei freni nelle istruzioni per l'uso del prodotto principale.

Posizione operativa

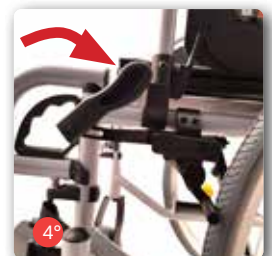



Orthopedic Service srls

Via Pietro Bianchi29/a
74122 Taranto Italy
Tel 099 776 2635 IT02928200738
segreteria@orthopedicservice.it

www.orthopedicservice.it



MOVILIDAD B + B IBERIA SL

C / dels Caputxins, 4 Edif. B -
3°C
E- 07002 Palma di Maiorca
www.bbeberia.es

B+B Francia SARL

Centro d'affari Parc Lumière 46
avenue des Frères Lumière
F-78190 Trappes
www.b-france.fr

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13
D-76307 Karlsbad
www.bischoff-bischoff.com



ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

